



JAN:4987028179696

固定化抗菌成分Etak配合

Etak® Dental Spray

イータクデンタルスプレー20ml

- 本品は義歯やマウスピースだけでなく、歯ブラシにもお使いいただけます。
- スプレー1本で簡単除菌&24時間抗菌コーティング。
- 使い続けることで汚れが付きにくくなり、お手入れも簡単に。
- 口臭やぬめりの原因となる菌の集まりにも有効です。

使用方法

口腔内装置を軽く洗浄して汚れを取り除き、水分を拭いた後、本品を数回スプレーし、乾燥させてからご使用ください。直接口にスプレーしないでください。商品にはアルコールが含まれているため、火気には注意してください。また、アレルギー体質の方やアルコールに対応できない素材には使用しないでください。

販売元：ザイコインターナショナル株式会社

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-24-7-309

Tel:03-6457-8379 Fax:03-6457-8399

Email : info@ziecor.jp URL: <https://ziecor.jp>