

開口補助器具

オーラルワイダー

- 口角部を無理なく、左右に開口できます。
- 患者さんに負担がかかりにくいソフトな装着感。
- 視野が広がるので、頬の内側や歯茎部など隅々まで楽にケアが可能です。
- 写真撮影や衛生指導にも便利です。


ソフトブルーとハードは同じサイズです。




ソフトブルー



ハード

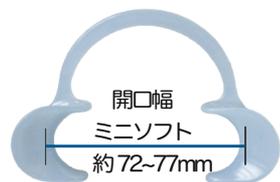ミニソフトブルー
(小児用)

* 開口幅とは：口に装着した際に当たる商品の口角部の位置から計測した寸法。

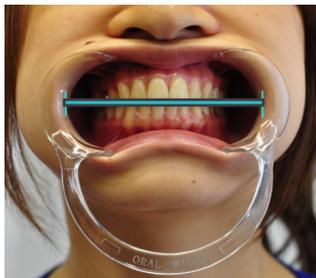

ワイダー・ミニ



ワイダー・チビ



*ミニよりチビのほうが大きめです。

装着方法



経口挿管時使用例

出典：東京歯科大学市川総合病院
歯科・口腔外科提供

ソフトブルー/ハード

1 個 入

2 個 入

ミニソフトブルー

1 個 入

2 個 入

洗浄・消毒方法

* 日常の食器類と同等に中性洗剤にて洗浄可能です。

* オートクレーブ(121°C)、EOG滅菌も可能です。

消毒方法に関する注意事項

* 洗浄液に長時間浸漬しないでください

* 紫外線滅菌庫には入れないでください

材質

* ソフトブルー・ミニソフトブルー・ワイダーチビ：ポリプロピレン

* ハード：ポリカーボネイト

* ワイダーミニ：ポリプロピレン、エラストマー