

口の開きづらい方、歯のない方の開口補助に

オーラルバイト・ワイド



オーラルバイト・スリム



全長：155 mm

幅：ワイド／約 15 mm

スリム／約 10 mm

材質：硬質ポリウレタン

Made in Japan

オーラルバイト・ワイド 5 本入

オーラルバイト・スリム 5 本入

- ▶▶ 口腔ケアの際に噛ませて開口するパッドです。開口障害等で口を開けるのが困難な方、長時間開口維持が難しい方、歯のない方向けの開口補助具です。
- ▶▶ 本品はおひとり様1本、他の患者さんと共有して使用しないでください。繰り返しご使用になる場合は、熱湯消毒をお勧めします。本品はポリウレタン製のため、薬液等の浸漬は変色や劣化の原因となります。また繰り返しご使用される場合は、ご使用前に必ず本品の状態を確認し、劣化が認められる場合は、早目に交換してください。

オーラルバイト使用方法



1. 本品を横向きにして口内に挿入。



2. 口内でひねって縦にし、開口視野を確保する。
(難しい場合は横でも可)



3. 開口を保持できたら、反対側を清掃する。



4. 拒否等のある場合は、本品にジャム等を塗布して開口を促す方法もある。

製造販売元：ザイコア・インターナショナル・インク

〒160-0022 東京都新宿区新宿6-7-22 エルブリメント新宿458 tel. 03 6457 8379 fax. 03 6457 8399

email:info@ziecor.jp URL:https://ziecor.jp